

بسمه تعالی			
شماره سند فرم: FO-QI-03		✧ عنوان سند : مدت زمان نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش ✧ نوع سند:	
تاریخ بازنگری:	تاریخ ابلاغ :	تعداد صفحات	دامنه کاربرد:
هدف :			
تعاریف:			

نوع نمونه	مدت زمان نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش	مدت زمان نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش
نمونه سرم	۱- نمونه های روتین (که انجام تست بصورت روزانه می باشد) در یخچال معمولی (حداکثر ۲۴ ساعت نگهداری می شود. ۲- نمونه های هفتگی : الف - (تست هایی که در هفته حداقل یک بار انجام می شود) در فریزر ۲۰-°C (حداکثر یک هفته) ب- (تست هایی که بصورت دوره ای انجام می شود) در فریزر ۲۰-°C (حداکثر دو هفته)	به مدت یک ماه در فریزر (۲۰-°C) نگهداری می شود و برای نمونه های روبلا به مدت دو ماه در فریزر (۲۰-°C) نگهداری می شود.
نمونه ادرار	در فریزر ۲۰-°C (حداکثر دو هفته)	یک ماه در فریزر نگهداری می شود
نمونه مدفوع	به مدت ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری می شود در غیر اینصورت نمونه اصلی مدفوع باید فریز شود	پس از انجام آزمایش نمونه استخراج شده به مدت یک ماه در فریزر (۲۰-°C) نگهداری می شود

امکانات و ملزومات و منابع :		
صاحبان فرایند:		منابع و مراجع:
ذینفعان :		
تهیه کننده :	تایید کننده: دکتر امیرحسین محمودی سمت : مدیر بیمارستان	ابلاغ کننده: دکتر ثمانه میرزاحسینی سمت : رئیس بیمارستان